


Przycisk sznurkowy

Art. Nr.: 735100 /957322

Uwagi ogólne

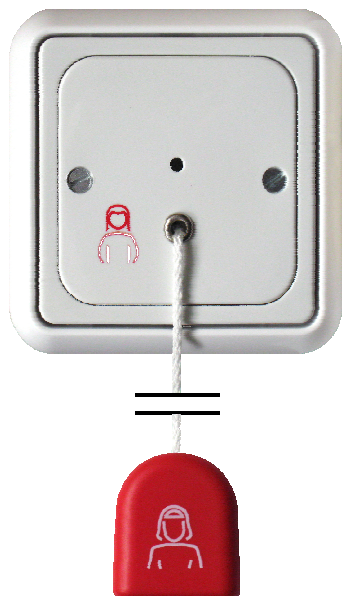

Każdemu przyciskowi pociąganemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk pociągany otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej Sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC

Dane ogólne

Wartości

Dane techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%
Pobór prądu	30 mA
Stopień ochrony	IP 20

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (**t, d**) i zasilanie **+24V, GND**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm (2 wolne)

Tabela adresowa

Adres	Funkcja
0	Wezwanie 1 z WC
1	Wezwanie 2 z WC
2	Wezwanie 3 z WC
3	Wezwanie 4 z WC
4	Wezwanie 5 z WC
5	Wezwanie 6 z WC
6	Wezwanie z łóżka 1-1
7	Wezwanie z łóżka 2-1
8	Wezwanie z łóżka 3-1
9	Wezwanie z łóżka 4-1
A	Wezwanie z łóżka 5-1
B	Wezwanie z łóżka 6-1
C	Wezwanie 1 z sali
D	Wezwanie 2 z sali
E	Wezwanie 3 z sali
F	Wezwanie 4 z sali

Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli wezwanie ma być wskazywane np. jako wezwanie z łóżka 1, to należy przełącznik adresów ustawić na adres „6” i nie zmieniać go więcej.

Przy stosowaniu przycisku pociąganego w łazience / WC zaleca się pozostawienie adresu „0” (ustawienie fabryczne). Jeśli w łazience/WC stosuje się więcej przycisków, to adresy należy odpowiednio dopasować.

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej płytce. Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach, tzn. adres „Wezwanie 2 z sali” można w sali przydzielić tylko raz. Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeżenie powyższego powoduje wadliwe działanie.

Wszystkie wezwania, oprócz wezwań z łóżek (adresy 6 do B) zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Wezwania z WC (adresy 0 do 5) wskazywane są na wyświetlaczu, jako wezwanie z WC z nr sali, bez dalszego rozróżniania). To samo dotyczy wezwań z sali (adresy C do F).

Wezwania z łóżek wskazywane są na użytych wyświetlaczach z numerem pokoju i łóżka (1 do 6). Lampka uspokajająca pali się tylko w przycisku, z którego nadano wezwanie.

- wersja bez komunikacji głosowej:

- przyłączamy magistralę danych (**a, b**) i zasilanie: **(+24V, GND)**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,8mm (2 wolne) - długość magistrali 100m.

- YTKSY 2x2x0,5mm (2 wolne) + YDY 2x1,5mm² - długość magistrali ponad 100m.

- wersja z komunikacją głosową:

- przyłączamy magistralę danych (**a, b**) i zasilanie: **(+24V, GND)**

- przyłączamy tory dla rozmowy: **a1, b1, a2, b2, S (ekran-drut)**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,8mm (2 wolne) + YTKSYekw 2x2x0,8mm - długość magistrali 100m.

- YTKSY 2x2x0,5mm (2 wolne) + YDY 2x1,5mm² + YTKSYekw 2x2x0,8mm -
długość magistrali ponad 100m.