

Schima Sp. z o.o.

ul. Kościelna 6

52 - 314 Wrocław

Tel.: 71/ 339 89 15 Fax.: 71/ 339 82 88

www.schima.plbiuro@schima.pl**SCHIMA**

Mediopt Care®

Przycisk przywoławczy**Art. Nr.: 735090/957212****Uwagi ogólne**

Każdemu przyciskowi przywoławczego można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC.

Dane techniczne

Dane ogólne	Wartości
Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%
Pobór prądu	35 mA
Stopień ochrony	IP 20

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (**t, d**) i zasilanie: **+24V, GND**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm (2 wolne)

Tabela adresów

Adres	Funkcja
0	Wezwanie 1 z sali
1	Wezwanie 2 z sali
2	Wezwanie 3 z sali
3	Wezwanie 4 z sali
4	Wezwanie 1 z WC
5	Wezwanie 2 z WC
6	Wezwanie 3 z WC
7	Wezwanie 4 z WC
8	
9	
A	Wezwanie z łóżka 1-3
B	Wezwanie z łóżka 2-3
C	Wezwanie z łóżka 3-3
D	Wezwanie z łóżka 4-3
E	Wezwanie z łóżka 5-3
F	Wezwanie z łóżka 6-3

Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli wezwanie ma być wskazywane np. jako wezwanie z łóżka 1, to należy przełącznik adresów ustawić na adres „A” i nie zmieniać go więcej.

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej płytce.

Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach sali, tzn. adres „Kasowanie wezwania 1 z WC” można w sali przydzielić tylko raz. Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeżenie powyższego powoduje wadliwe działanie.

Jednemu łóżku można przydzielić maksymalnie 3 przyciski, lecz każdy z innym podadresem. Sam przycisk przywoławczy udostępnia jednakże tylko jeden podadres wezwania z łóżka „Łóżko nr 3” Gniazdo systemowe udostępnia dodatkowo podadresy wezwania z łóżka „Łóżko nr 1” i wezwania z łóżka „Łóżko nr 2”. Przyciski pociągane i pneumatyczne udostępniają dodatkowo podadres wezwania z łóżka „Łóżko nr 1”.