

Przycisk przywoławczo-odwoławczy Art. Nr.: 735070

Uwagi ogólne



Każdemu przyciskowi przywoławczemu / obecności / odwoławczemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy / obecności / odwoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z WC wzgl. aktywuje/dezaktywuje akustyczne przekierowanie wezwania.

Dane techniczne

Dane ogólne	Wartości
Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%
Pobór prądu	35 mA
Stopień ochrony	IP 20

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (**t, d**) i zasilanie: **+24V, GND**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm (2 wolne)

Tabela adresów

Adres	Funkcja
0	Wezwanie 1 z sali i obecność S1-1 + akustyczne przekierowanie wezwania
1	Wezwanie 2 z sali i obecność S1-2
2	Wezwanie 3 z sali i obecność S1-3
3	Wezwanie 4 z sali i obecność S1-4
4	Wezwanie 5 z sali i obecność S1-5
5	Wezwanie 6 z sali i obecność S1-6
6	
7	Wezwanie 1 z WC z kasowaniem
8	Wezwanie 2 z WC z kasowaniem
9	Wezwanie 3 z WC z kasowaniem
A	Wezwanie 4 z WC z kasowaniem
B	
C	
D	
E	
F	

Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli przycisk przywoławczo odwoławczy ma być użyty jako przycisk z akustycznym przekierowaniem wezwania, to należy przełącznik adresów ustawić na adres „0” (ustawienie fabryczne) i nie zmieniać go więcej.

Aby instalacja odpowiadała wymaganiom normy DIN VDE 0834, ustawienie takie może występować w sali tylko raz.

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej płytce. Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach sali, tzn. adres „Kasowanie wezwania 1 z WC” można w sali przydzielić tylko raz. Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje wadliwe działanie.

Wszystkie wezwania zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Lampka uspokajająca pali się tylko w przycisku, z którego nadano wezwanie. Wszystkie ustawione obecności zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Obecność jest sygnalizowana równocześnie i równolegle na wszystkich przyciskach obecności (np. przy ich usytuowaniu przy łóżkach).