



### LEGENDA

	Salowa lampka sygnalizacyjna art. 735040 Montaż h=2,2m do puszkki f60.
	Grupowa lampka sygnalizacyjna art. 735480 Montaż h=2,2m do puszkki f60.
	Przycisłk przywoł-odwoł art. 735070 Montaż h=1,2-1,3m do puszkki f60.
	Przycisłk sznurkowy art. 735100 Montaż h=2,2m do puszkki f60.
	Przycisłk przywołałwoczy art. 735090 Montaż h=0,9m do puszkki f60.
	Gniazdo + manipulator art. 735164+7334K Montaż h=1-1,4m do puszkki f60. Lub w zestawie nadłożkowym.
	Przycisłk kasujący art. 735080 Montaż h=1,2-1,3m do puszkki f60. Lub w zestawie z gniazdem 735164.
	Centralka art. 735000 Montaż h=1,5-1,6m n/t.
	TP - terminal lekarza art. 735031 Montaż h=1,5-1,6m p/t - puszka regipsow zespolona podwojna. Os pionowa.
	Zasilacz 240W, 24V DC, 10 art. 957452 Montaż szyna DIN TS35 / 7.5 lub 15

### Uwagi do wykonania instalacji.

Instalację na korytarzu wykonac przewodem YTKSY 3x2x0,8mm. Moze byc innego typu, ale zawsze drut. Zasilanie moze zostac odseparowane od danych i prowadzone osobnym przewodem o wiekszym przekroju. Zalecam zamkniecie magistrali korytarzowej i zasilania w petle dla wiekszenia pewnosci zasilania i transmisji danych. Dopuszczalne sa wszelkie odnogi od glownej magistrali, albo mniejsze petle na trasie prowadzonych przewodow.

