

## Przycisk przywoławczo-odwoławczy

Art. Nr.: 735070/957292

### Uwagi ogólne



Każdemu przyciskowi przywoławczemu / obecności / odwoławczemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk przywoławczy / obecności / odwoławczy otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali lub wezwanie z WC wzgl. aktywuje/dezaktywuje akustyczne przekierowanie wezwania.

### Dane techniczne

| Dane ogólne        | Wartości       |
|--------------------|----------------|
| Napięcie zasilania | 24 V DC +/-10% |
| Pobór prądu        | 35 mA          |
| Stopień ochrony    | IP 20          |

### Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (**t, d**) i zasilanie: **+24V, GND**

*Sugerowane przewody:*

- YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne)

**Tabela adresów**

| Adres | Funkcja  |
|-------|--|
| 0     | Wezwanie 1 z sali i obecność S1-1 + akustyczne przekierowanie wezwania |
| 1     | Wezwanie 2 z sali i obecność S1-2                                      |
| 2     | Wezwanie 3 z sali i obecność S1-3                                      |
| 3     | Wezwanie 4 z sali i obecność S1-4                                      |
| 4     | Wezwanie 5 z sali i obecność S1-5                                      |
| 5     | Wezwanie 6 z sali i obecność S1-6                                      |
| 6     |  |
| 7     | Wezwanie 1 z WC z kasowaniem   |
| 8     | Wezwanie 2 z WC z kasowaniem   |
| 9     | Wezwanie 3 z WC z kasowaniem   |
| A     | Wezwanie 4 z WC z kasowaniem   |
| B     |  |
| C     |  |
| D     |  |
| E     |  |
| F     |  |

Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli przycisk przywoławczo odwoławczy ma być użyty jako przycisk z akustycznym przekierowaniem wezwania, to należy przełącznik adresów ustawić na adres „0” (ustawienie fabryczne) i nie zmieniać go więcej.

**Aby instalacja odpowiadała wymaganiom normy DIN VDE 0834, ustawienie takie może występować w sali tylko raz.**

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej płytce. Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach sali, tzn. adres „Kasowanie wezwania 1 z WC” można w sali przydzielić tylko raz. Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje wadliwe działanie.

Wszystkie wezwania zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Lampka uspokajająca pali się tylko w przycisku, z którego nadano wezwanie. Wszystkie ustawione obecności zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy. Obecność jest sygnalizowana równocześnie i równoległe na wszystkich przyciskach obecności (np. przy ich usytuowaniu przy łózkach).